



mobilitieg
solutions

Otolift Line Para escaleras rectas



Contenido

De confianza y a precios asequibles	4
Compacta y segura	6
Intuitiva y fácil de usar	8
Evaluación y costes	14



Otolift Line

De confianza y a precio asequibles

Otolift Line está especialmente diseñada para escaleras rectas. En la fase de diseño nuestro único foco no es sólo la seguridad sino también la fiabilidad. Por lo tanto sólo utilizamos materiales de alta calidad que hace que la silla perdure en el tiempo sin problemas.

Cada Otolift Line está hecha a medida y por lo tanto siempre encaja a la perfección en su escalera. Otro aspecto importante es la facilidad de uso, la silla es ligera y fácil de plegar y el asiento y respaldo están equipados con una cómoda tapicería.

Beneficios de la Otolift Line

- Fuerte y confiable
- Precio asequible
- Cómoda y fácil de usar
- Diseño ligero



Diseño ligero y completamente plegable



Tapicería de alta calidad para una mayor comodidad



Otolift Line

Compacta y segura

El ligero diseño de la Otolift Line te asegura dejar mucho espacio libre en tu escalera. La escalera, por lo tanto, es segura de usar para usted y otros usuarios. La silla gira sin esfuerzo en la parte superior de la escalera, lo que asegura una subida y bajada de la misma con total seguridad.

La Otolift Line está equipada con un sistema de diagnóstico Interno. La pantalla en el reposabrazos le da la información del estado de la silla en todo momento. La silla se para automáticamente si hay un obstáculo en la escalera y la pantalla le mostrará dónde se encuentra éste para que pueda retirarlo fácilmente. Además está equipada por un sistema de llave para que pueda bloquearla si así lo necesita. Puede llevar la silla hasta cualquier punto del rail utilizando el mando a distancia.



Otolift Line

Intuitiva y fácil de usar

La Otolift Line es muy fácil de usar. Después de la instalación, los técnicos le explicarán con calma y de manera clara su funcionamiento.



Paso 1

Con el control remoto puede mover la silla hasta usted.



Paso 2

El asiento y el apoyabrazos son ligeros y fáciles de desplegar.



Paso 3

Siéntese en el cómodo asiento.



Paso 4

Mueva el joystick del apoyabrazos en la dirección que desee moverse y la silla comenzará a desplazarse suavemente.



Paso 5

La silla continuará avanzando Tranquilamente hasta llegar al final y parará automáticamente.



Paso 6

El asiento girará fácilmente para que pueda bajar de manera segura.

Otolift Line

Intuitiva y fácil de usar



Sistema de Batería

Gracias al pequeño sistema de Batería, la silla se puede utilizar Incluso en casos de fallo eléctrico.



Compacta

Es completamente plegable. Cuando se pliega el asiento, el reposapiés se pliega automáticamente *(Opcional)*



Simple

El cinturón de seguridad puede colocarse con una sólo mano.



Segura

La silla gira 90° automáticamente al final de la escalera para una subida y bajada segura de la misma. *(Opcional)*



Parada automática

La silla se parará automáticamente si encuentra algún tipo de resistencia en la escalera.



Ventajas

El raíl está equipado con un sistema de carga continua que le permite aparcar la silla en cualquier punto de la escalera.

Evaluación y costes de una Otolift

Ya hemos comentado un montón de información sobre nuestro modelo de salvaescaleras para escaleras rectas , pero ¿Cuál será el coste de una Otolift?

Desafortunadamente como cada escalera es diferente y usted tiene sus propias preferencias, no podemos dar una respuesta simple a esta pregunta sin una evaluación de su escalera y sus necesidades en persona.

Gratuitamente y sin compromiso usted podrá solicitar una evaluación de su escalera por uno de nuestros técnicos que le aconsejará personalmente.

Por supuesto esperamos que nos considere a la hora de dar el siguiente paso: ¡Una evaluación sin compromiso!



Un negocio familiar de confianza, desde 1891

su distribuidor más cercano



mobiliteg
solutions

C/Casino 3, 38280, Tegueste, Tenerife
mobiliteg@mobiliteg.com 922077022/922080872

www.otoliftsalvaescaleras.es